

# Blutdruckmessgerät/Oberarm

## BPM 1601 FITvigo



# ADE



FITvigo



## DE | Kurzanleitung

Die ausführliche Bedienungsanleitung zum Download als PDF-Datei finden Sie im Internet unter [www.fitvigo.de/support](http://www.fitvigo.de/support).



# Sicherheit

---

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich für den Kauf eines Produkts des

FITvigo Programms von ADE entschieden:

Aktivitätstracker, Personen- und Analysewaagen sowie Blutdruckmessgeräte mit Bluetooth-Funktion, die mit der kostenlosen FITvigo App verbunden werden können. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem FITvigo Produkt.

## Ihr ADE-Team

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Blutdruck-/Pulsmessung am Oberarm von erwachsenen Menschen. Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für den gewerblichen Einsatz in Arztpraxen, Kliniken etc. nicht geeignet.

## Sicherheitshinweise


- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Gerät und Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.
- Vermeiden Sie Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie ausschließlich die zum Lieferumfang gehörenden Teile. Kombinieren Sie sie nicht mit den Teilen eines anderen Blutdruckmessgerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.

**Die von Ihnen gemessenen Werte dienen Ihrer Information und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Treffen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen.**

**Ändern Sie aufgrund einer Messung niemals die Dosierung eines vom Arzt verordneten Medikaments.**

## Lieferumfang + Bedienelemente

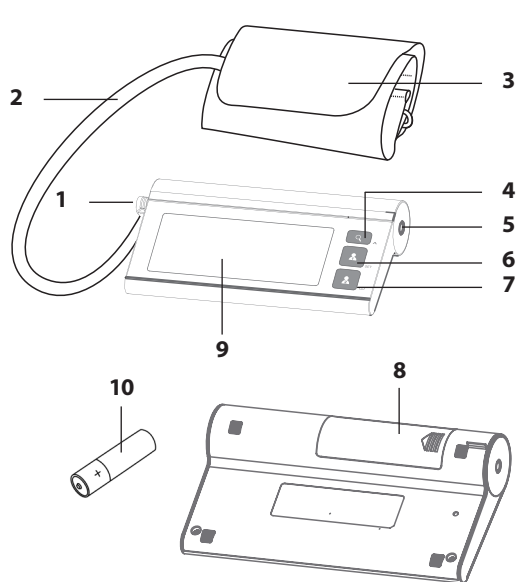


- 1 Anschlussbuchse Schlauch
- 2 Schlauch
- 3 Manschette
- 4 Letzte Messung aufrufen
- 5 Anschlussbuchse Netzadapter
- 6 Benutzer 1 / Programmier Taste SET
- 7 Benutzer 2 / Verbindungstaste Bluetooth
- 8 Batteriefach
- 9 Display
- 10 4 Batterien LR3 (AAA), 1,5 V



- Die App „FITvigo“ können Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen, siehe „App installieren“.
- Ein Netzadapter gehört nicht zum Lieferumfang und kann optional bestellt werden.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

# Display-Anzeigen

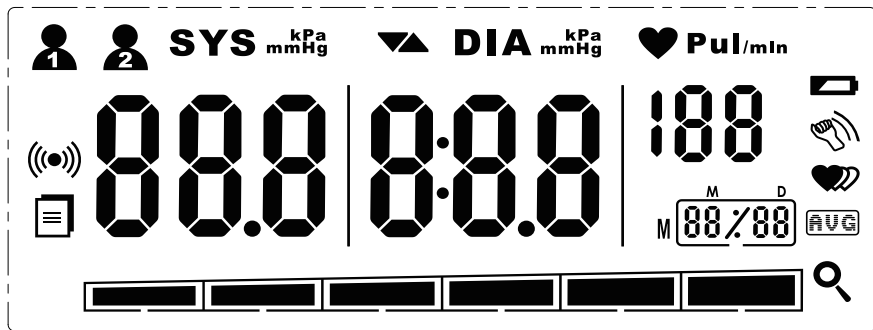

Symbol	Funktion	Beschreibung
--------	----------	--------------












Benutzer 1-Taste

Messung für Benutzer 1 starten und Messergebnisse übertragen, Programmieren



Benutzer 2-Taste

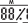Messung für Benutzer 2 starten und Messergebnisse übertragen, Mit App verbinden


Symbol	Funktion	Beschreibung
<b>SYS</b>	Systolischer Blutdruck	Oberer Blutdruckwert
<b>DIA</b>	Diastolischer Blutdruck	Unterer Blutdruckwert
<b>Pul/min</b>	Puls	Pulsschläge / Minute
	Pulserkennung	Zeigt Ihren Herzschlag, solange er erkannt wird
	Daten bereit zur Übertragung	Messdaten sind im Gerät gespeichert
	Datenübertragung	Datenübertragung ist erfolgt
	Mittelwert	Mittelwert der letzten drei Messungen
	Stoßerkennung	Stöße führen zu ungenauen Messungen
	Batterien schwach	Batterien sind schwach und müssen ausgetauscht werden
mmHg kPa	Einheit	Maßeinheit des Blutdrucks
AM 	Aktuelle Uhrzeit	Monat, Tag, Stunde, Minute
	Entlüftung	Manschette wird entlüftet
	Unregelmäßiger Herzschlag	Beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Anleitung

# Inbetriebnahme

## Batterien einlegen

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab.
2. Setzen Sie die Batterie ein, wie auf dem Batteriefachboden abgebildet.

Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).

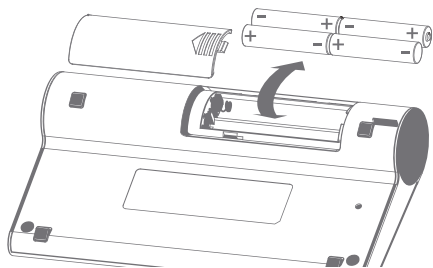





3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

## Manschette anschließen

- Stecken Sie den Schlauch in die Anschlussbuchse am Gerät.

## Uhrzeit und Datum einstellen

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit der Taste  die aktuelle Stundenzeit ein. Drücken Sie .
3. Gehen Sie vor wie beschrieben, um nachfolgend folgende Werte einzustellen:  
Stunden > Minuten > Monat > Tag > Jahr > Maßeinheit.
4. Drücken Sie abschließend . Sobald Sie im Display „done“ angezeigt bekommen, ist der Vorgang beendet. Kurz darauf schaltet sich das Gerät aus.

## App installieren

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden ist.
2. Laden Sie die „FITvigo“ App im Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter.



- Je nach Einstellungen des Smartphones können für die Internetverbindung oder Datenübertragung zusätzliche Kosten anfallen.
- Wir empfehlen den Download über ein WLAN-Netzwerk.

## Gerät mit der App verbinden (Pairing)

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
2. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen. Beachten Sie die angezeigten Informationen und Erläuterungen.

Nach kurzer Zeit haben Sie das Blutdruckmessgerät mit der FITvigo App verbunden.

Alle weiteren Informationen zum Gebrauch finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Diese finden Sie im Internet unter

**[www.fitvigo.de/support](http://www.fitvigo.de/support)**

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie weiterführende Fragen ?

Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an:

[support@fitvigo.de](mailto:support@fitvigo.de)

## Garantie

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
die Firma Waagen-Schmitt GmbH garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch.  
Bitte geben Sie den Artikel im Garantiefall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

## Inverkehrbringer

---



Waagen-Schmitt GmbH  
Hammer Steindamm 27-29  
22089 Hamburg, Germany